

## 感染予防は手洗いから・・・手洗い方法の確認に

# 手洗い チェッカー LED

専用ローションを手についた汚れに見立てて、専用ライト下で光らせます。  
適切な手洗いが実施できているか確認できます。  
専用ライトはLEDを採用していますので、従来の蛍光管タイプと  
比較して電池寿命が約4倍長持ちします。



洗い残しが光ります

### 手洗いチェッカーLED セット内容



- 1 手洗いチェッカー 本体
- 2 ブラックライトLED (乾電池付き 単3×4本)
- 3 手洗い用石けん液 250mL 1本
- 4 手洗いチェッカーローション 250mL 2本

コンパクトに収納できます



単品でも取り扱っています。

### ブラックライトLED

手洗いチェッカーLED付専用ライトの単品商品です。  
既にご購入の「手洗いチェッカー」にも使用可能です。  
※本商品には電池は同梱されていません。




### 手洗いチェッカーの使用方法 ※詳細は取扱説明書をご覧ください。



専用のローションをワンプッシュ (約1mL) 手に取り、まんべんなくぬり広げます。



手洗い用石けん液を使って、普段通りの手洗いを行います。

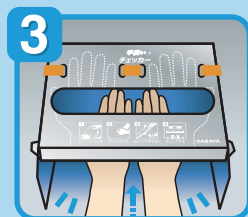

専用ライトを取り付けた本体に手を入れます。



洗い残した部分が光ります。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
手洗いチェッカーLED	1セット	1	41338	49-87696-41338-2
ブラックライトLED	-	1	41357	49-87696-41357-3
手洗い用石けん液 シャボネットユ・ムS	250mLポンプ付	24	23357	49-73512-23357-9
手洗いチェッカーローション	250mLポンプ付	12	41354	49-73512-41354-4

**安全にお使い  
いただくために**

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。  
他社の薬液では思わぬトラブルの生じる恐れがありますので、お使いにならないでください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。  
■ 写真及び印刷の仕上がりに、現品と色合いが若干異なる場合があります。  
■ カタログ掲載製品の詳細については、販売店・専門施工店または当社にお尋ねください。  
■ このカタログは2011年2月現在のものです。

**SARAYA** サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>