



手指消毒 チェックカー

専用ローション

手指消毒方法の確認に！

手に塗り広げやすく、塗った後に専用のライトを当てると、正確に手指消毒が実施できているかを確認できます。



使用方法



1 適量（1プッシュ程度）を手に塗り広げてください。



2 専用のライトに当ててください。



3 専用のライトを当てると、適切に手指消毒ができている部分が光ります。



4 確認後は石けんで十分に洗い流してください。

【使用上の注意】

●目に入らないように注意してください。目に入った場合は速やかに流水でよく洗眼してください。異常が残る場合は専門医にご相談ください。●衣服に付くと取れにくいので注意してください。●小児の手の届かないところに保管してください。●他の容器に入れ替えないでください（誤用や品質が変わる原因になるため）。●用途以外に使用しないでください。●高温多湿の場所を避け、開封後はお早めにお使いください。●火気に近づけないでください。●初期火災の場合、大量の水または消火器で消火してください。●ノズルの先が詰まった場合は、詰まりを取り除いてから使用してください。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤ手指消毒チェックカーローション	250mLポンプ付	6×4	41657	49-87696-41657-4

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■記載内容は2023年1月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
 (受付時間：平日 9:00～18:00)