

環境用除菌クロスのご案内

洗浄

除菌

ウイルス除去

サラサイド除菌クロス

- 第四級アンモニウム塩、エタノール、アルカリ剤の相乗効果で、除菌・ウイルス除去効果を発揮。
- 二度拭き不要。



アウト
ブレイク発生
のリスク
低減に

1枚のサイズ：
150×300mm

51684

51685

51686

商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
51684	250枚入容器	6	オープン価格
51685	250枚入詰替	6	オープン価格
51686	80枚ピロータイプ	30	オープン価格

※480枚規格、80枚規格もございます。

除菌

サラヤ エタノールクロス80

- 高濃度エタノール(80%)が強力な除菌効果を発揮。
- 成分はエタノールと精製水のみを含有し、薬剤の残留がありません。
- 二度拭き不要。



テーブル
など
環境表面の
除菌に

1枚のサイズ：
150×300mm

44160

44161

商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
44160	250枚入容器	6	5,300円
44161	250枚入詰替	6	2,900円

※480枚規格、80枚規格もございます。

洗浄

除菌

ウイルス除去

サラヤ 環境清拭クロス PREMIUM CLEANING

- 拭きははじめから拭き終わりまで質の高い環境清拭を実現。
- 高い除菌効果、ウイルス不活化効果を有しており、清拭後は除菌効果が持続。
- 二度拭き不要。



タンパク、
油汚れの
除去に

1枚のサイズ：
150×300mm

44174

44175

商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
44174	250枚入容器	6	オープン価格
44175	250枚入詰替	6	オープン価格

洗浄

除菌

サラヤ 環境清拭クロス

- 洗浄成分が汚れを浮かし、第四級アンモニウム塩が除菌効果を発揮。
- 金属やプラスチックへの腐食が少なく、幅広い素材に対応。
- 二度拭き不要。



タンパク、
油汚れの
除去に

1枚のサイズ：
150×300mm

44167

44168

51687

商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
44167	250枚入容器	6	3,250円
44168	250枚入詰替	6	2,150円
51687	80枚ピロータイプ	30	オープン価格

※480枚規格、80枚規格もございます。

洗浄

除菌

ウイルス除去

サラヤ ジアクロス

- 次亜塩素酸ナトリウム配合の専用液をドライクロスに含ませることで、殺芽胞効果、ウイルス不活化効果を発揮。
- 含浸後2ヶ月間、有効塩素濃度1,000ppm以上を維持。



血液・
汚物等の
処理に

1枚のサイズ：
140×210mm

42386

42410

42385

商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
42386	80枚入容器	20	オープン価格
42410	80枚入詰替	20	オープン価格
42385	230mL専用液	20	オープン価格

環境清拭用クロスピロータイプ専用ホルダー

- 環境用除菌クロス80枚ピロータイプがスムーズに取り付け可能。
- 回診車、ワゴン、ベッドサイドへ引っ掛けて使用できます。



44177

商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
44177	本体	10	500円

※サラサイド除菌クロス(51686)、サラヤ環境清拭クロス(51687)に対応しています。

サラヤ 環境用除菌クロス製品

特徴

使い捨てのため薬剤調整やふきん等の管理も不要で、手軽に環境整備が行えます。
手指の接触頻度の高い環境など、こまめな清掃が必要な箇所には、薬液含浸クロスの使用がおすすめです。

用途一覧

製品名	用途 ● 除菌 ● 洗浄 ● エンペローウイルス対策 ● ノンエンペローウイルス対策 ● 芽胞対策	高頻度接触表面の清掃		血液・嘔吐物による 汚染箇所の処理	
		日常	感染症流行期		
サラヤ ジアクロス ^{※1} ※清拭後、二度拭きが必要		● ● ● ● ●	—	★★★	★★★
サラサイド 除菌クロス		● ● ● ●	★★★	★★★	—
サラヤ 環境清拭クロス PREMIUM CLEANING		● ● ● ●	★★★	★★	—
サラヤ 環境清拭クロス		● ● ●	★★★	★★	—
サラヤ エタノールクロス80		● ●	★★★	★★	—

※1 次亜塩素酸ナトリウムは有機物によって不活性化されやすいため注意が必要
●：推奨度 —：用途外
● 人体に使用することはできません。● トイレには流せません。
● 対象によって使用できないものや、材質・塗装の種類によって表面が変色・変質することがありますので、ご使用時には製品ラベル等をご確認ください。

清掃方法(例)

高頻度接触表面	頻度	清掃方法
オーバーテーブル 	1日1回以上	① クロスを1枚取り出す ② 上部表面をS字に清拭する ③ 調節レバーを清拭する
ベッドリモコン 手摺り ドアノブ 電気スイッチ	1日1回以上	① クロスを1枚取り出す ② ベッドリモコンを包むように清拭する ③ 手摺りを清拭する ④ ドアノブを清拭する ⑤ 電気スイッチを清拭する

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がりに、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2021年12月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)