



# サラヤ プラスチック手袋



## PLASTIC DISPOSABLE GLOVES

### Personal Protective Equipment

- 耐久性があり、手にぴったりフィットする薄手仕上げなので、素手感覚でお使いいただけます。
- 左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
- 手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです。

※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

一般医療機器 届出番号 27B1X00120000700  
非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000  
医療機器クラス分類 クラス I

耐久性があり、手にぴったりフィット



パウダーフリー/100枚入  
サイズ / XS・S・M・L

様々なシーンでお使いいただけます。  
(医療・介護など)

# わかりやすいパッケージデザインで現場をフォロー



▼忙しい現場でも一目で中身を認識できます。

▲(設置例)PPE 専用ホルダー(別売)  
PPE 専用ホルダーには樹脂製もあります。(別売)▶

## 着脱方法

着け方	外し方
<p>① 手首の部分をつかんで装着する</p>	<p>① 片方の手袋の袖口をつかむ</p>
<p>② 手袋を裏表逆になるように外す</p>	<p>② 手袋を裏表逆になるように外す</p>
<p>③ 手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む</p>	<p>③ 手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む</p>
<p>④ 裏表逆になるように外す</p>	<p>④ 裏表逆になるように外す</p>
<p>⑤ 外した手袋はすぐに廃棄する</p>	<p>⑤ 外した手袋はすぐに廃棄する</p>

## 手袋サイズ早見表

この表で手幅を計り手袋サイズの目安を出します

① 人差し指を青のラインに合わせる

② 右手の人差し指の付け根部分で重ね合わせる

手の甲の右はじと赤線が合った所がおおまかなサイズとなります。

※製品により多少誤差の出る場合があります。

## 手袋サイズ表

サイズ	XS	S	M	L
全長(mm)	240			
掌幅(mm)±5mm	75	85	95	105

## 仕様

【材質】塩化ビニル樹脂(PVC)  
 【サイズ】XS・S・M・L  
 【タイプ】パウダーフリー 左右兼用  
 【カラー】クリア

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤプラスチック手袋 粉無	100枚 / XS	10	53497	49-87696-53497-1
	100枚 / S		53498	49-87696-53498-8
	100枚 / M		53499	49-87696-53499-5
	100枚 / L		53500	49-87696-53500-8

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年3月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
 (受付時間：平日 9:00～18:00)