

# サラヤ プラスチック手袋 EVA



PLASTIC DISPOSABLE GLOVES EVA

Personal Protective Equipment

- 柔軟性と弾力性に優れた素材です。
- 薄く、ひっぱると指先にフィットしますので、細かな作業にも使えます。
- 左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。

ひっぱると

指先にフィット



入数 / 200 枚入  
サイズ / S・M・L

おむつ交換

汚物・吐物の処理

吸引処置


厨房での作業、清掃

などに。

食品衛生法適合品（厚生省告示 第370号）


着脱方法（例）

着け方

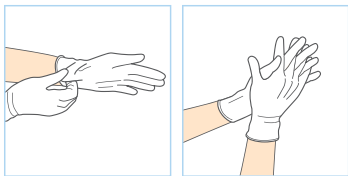

- ① 手首の部分をつかんで装着する
- ② 指先部分をフィットさせる。

外し方

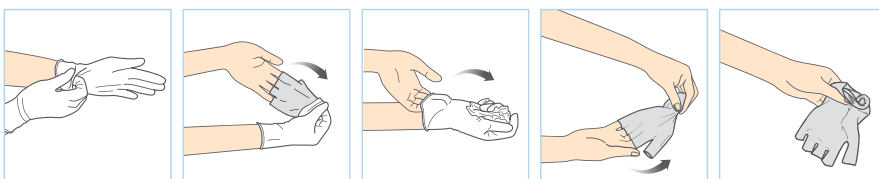

- ① 片方の手袋の袖口をつかむ
- ② 手袋を裏表逆になるように外す
- ③ 手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む
- ④ 裏表逆になるように外す
- ⑤ 外した手袋はすぐに廃棄する

手袋サイズ早見表

この表で手幅を計り手袋サイズの目安を出します

手袋サイズ表

| サイズ           | S   | M   | L   |
|---------------|-----|-----|-----|
| 全長(mm)±5mm    | 280 |     |     |
| 掌幅(mm)±5mm    | 110 | 115 | 120 |
| 中指の長さ(mm)±5mm | 75  | 81  | 85  |

仕様

- 【材 質】 ポリエチレン、エチレン酢酸ビニル共重合体(EVA)
- 【サイズ】 S M L
- 【タイプ】 左右兼用
- 【カラー】 半透明

| 品 名            | 内容量 / 規格  | 1梱入数 | 商品コード | JANコード           |
|----------------|-----------|------|-------|------------------|
| サラヤプラスチック手袋EVA | 200枚 Sサイズ | 20   | 53508 | 49-87696-53508-4 |
|                | 200枚 Mサイズ | 20   | 53509 | 49-87696-53509-1 |
|                | 200枚 Lサイズ | 20   | 53510 | 49-87696-53510-7 |

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2011年07月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部  
TEL.06-4706-3938 (受付時間：平日 9:00~18:00)

取扱店